

OPTI-FREE* PureMoist* večnamenska dezinfekcijska raztopina
NAVODILO ZA UPORABO

Natančno preberite to navodilo in ga shranite za prihodnjo uporabo.

OPTI-FREE* PureMoist*

Večnamenska dezinfekcijska raztopina za leče iz silikonskega hidrogela in mehke kontaktne leče

DELOVANJE:

Če jo uporabljamo v skladu z navodili, **raztopina OPTI-FREE PureMoist:**

- **Čisti** leče, saj med razkuževanjem in shranjevanjem leč odstranjuje z njih usedline beljakovin in maščob.
- **Razkužuje:** Biokompatibilni razkužili POLYQUAD* in ALDOX* učinkujeta proti škodljivim mikroorganizmom (bakterijam, glivicam in *Acanthamoeba*).
- **Izpira:** Lahko uporabljate za izpiranje in vlaženje svojih kontaktnih leč ob vsakem času.
- **Shranjuje:** Namenjena je za shranjevanje leč do 30 dni po razkužitvi.
- **Nudi celodnevno udobje** zahvaljujoč **vlažilnemu matriksu HydraGlyde***, ki privlači vlogo na vaše leče in jih ohranja navlažene ves dan. Vzdržuje nepretrgano vlažilno oblogo, ki omogoča nedražeče drsenje vaših očesnih vek po površini leč.

Pri vsakodnevni uporabi **raztopine OPTI-FREE PureMoist** uporaba dodatnega encimskega čistila ni potrebna.

Svoje leče shranjujte v raztopini **OPTI-FREE® PureMoist** in ne v fiziološki raztopini. Fiziološka raztopina ne bo razkužila leč.

SPLOŠNA NAVODILA:

- Pred uporabo popolnoma odstranite folijo z napisom, ki obkroža vrat plastenke.
- Pred uporabo kontaktnih leč si roke vedno umijte in jih posušite.
- Vsakokrat, ko odstranite leče, jih očistite, navlažite, izperite in razkužite.
- Vedno najprej odstranite isto lečo, bodisi desno ali levo, da ju ne bi zamenjali.
- Po uporabi vedno izpraznite posodico za leče in jo izperite s svežo **raztopino OPTI-FREE PureMoist** ter jo pustite odprto, da se posuši na zraku. Posodice za leče ne smete izpirati z vodo.

ZA NAJBOLJŠI UČINEK SLEDITE NASLEDNJIM NAVODILOM:

1. Vsako stran leče **temeljito navlažite z raztopino OPTI-FREE PureMoist**. Lečo drgnite 20 sekund.
2. Vsako stran leče **izpirajte 10 sekund z enakomernim curkom raztopine OPTI-FREE**

PureMoist.

3. Posodico za leče ALCON® **napolnite** s svežo raztopino **OPTI-FREE PureMoist**. Leče **shranjujte** v zaprti posodici čez noč ali najmanj 6 ur. Po namakanju v raztopini so leče pripravljene za nošenje.

Če na kontaktnih lečah ostanejo nečistote, leče pred ponovnim vstavljanjem izperite z raztopino **OPTI-FREE PureMoist**.

V neodprti posodici za leče, ki vsebuje raztopino **OPTI-FREE PureMoist**, lahko leče shranjujete do 30 dni. Po tem času je treba leče pred nošenjem očistiti in razkužiti z raztopino **OPTI-FREE PureMoist**.

Vedno upoštevajte navodila svojega očesnega strokovnjaka. Navodil za nego svojih leč ali raztopine za nego leč ne smete spreminjati, ne da bi se posvetovali s svojim očesnim strokovnjakom.

OPIS:

OPTI-FREE PureMoist je sterilna, puferirana, vodna raztopina, ki vsebuje natrijev citrat, natrijev klorid, borovo kislino, sorbitol, aminometilpropanol, dinatrijev edetat, dve vlažilni sestavini (TETRONIC 1304[†] in vlažilni matriks HydraGlyde [EOBO – 41-polioksietilen-polioksibutilen]) s konzervansoma POLYQUAD (polikvaternij-1) 0,001% in ALDOX (miristamidopropildimetilamin) 0,0006%. Vlažilni matriks HydraGlyde je lastniško ime za multifunkcijski blok kopolimer, ki je prvenstveno namenjen vlaženju in lubriciranju silikonsko- hidrogelnih leč.

[†]TETRONIC® je registrirana blagovna znamka BASF.

INDIKACIJE (uporaba):

Za uporabo pri vsakodnevem čiščenju, vlaženju, izpiranju, odstranjevanju beljakovinskih usedlin, zmanjševanju odlaganja maščob, kemični (ne termični) dezinfekciji ter shranjevanju leč iz silikonskega hidrogela in mehkih (hidrofilnih) kontaktnih leč v skladu s priporočili vašega očesnega strokovnjaka.


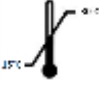



KONTRAINDIKACIJE (razlogi, zakaj ne smete uporabljati raztopine):

Ne uporabljajte, če ste alergični na katerokoli sestavino tega izdelka.

OPOZORILA:

Izredno pomembno je, da upoštevate navodila svojega očesnega strokovnjaka in vsa priložena navodila za pravilno uporabo in nego svojih leč ter za uporabo izdelkov za nego leč, vključno s posodico za leče. V primeru trdovratnega neprijetnega občutka v očesu, čezmernega solzenja, sprememb vida ali rdečine očesa TAKOJ odstranite leče in se posvetujte s svojim očesnim strokovnjakom, saj sicer težave lahko postanejo resnejše.

PREVIDNOSTNI UKREPI:

- Vedno uporabljajte le svežo **raztopino OPTI-FREE PureMoist**. Raztopine v posodici za leče ne smete nikoli ponovno uporabiti.
- VIDNA POŠKODBA: Ne uporabljajte, če je varnostni obroček na zaporki poškodovan ali če ga ni ali če ni zaporka. 
- Da preprečite kontaminacijo, pazite, da se z vrhom kapalnega dela plastenke nikoli ne dotaknete nobene površine.
- Po uporabi plastenko spet zaprite z zaporko.
- Shranjujte pri temperaturi nad 15 °C. Shranjujte pri temperaturi do 30°C. 
- Plastenko shranjujte tesno zaprto, ko je ne uporabljate.
- Raztopino porabite pred iztekom roka uporabnosti, ki je označen na izdelku. 
- Zavrzite vso raztopino, ki je ne porabite v roku šestih mesecev po prvem odprtju plastenke. 
- Shranjujte nedosegljivo otrokom. 
- Ni primerno za uporabo s toplotno (termično) dezinfekcijo.

PAKIRANJE:

OPTI-FREE PureMoist, ki je sterilizirana s filtracijo, je na voljo v plastenkah velikosti od 60 ml do 480 ml. Plastenke in škatle so označene s serijsko številko in datumom izteka roka uporabnosti.



ALCON® posodica za leče



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, ZDA 76134-2099

a Novartis company



Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
GU16 7SR, Surrey
Velika Britanija



© 2015 Novartis

* blagovna znamka podjetja Novartis